

Katheterbevestigingshulpmiddel

Lees dit zorgvuldig alvorens het hulpmiddel te gebruiken

Punten van overweging ten aanzien van veiligheid en doeltreffendheid:

⊗ Uitsluitend voor eenmalig gebruik. ⚠ Niet opnieuw steriliseren.

⚠ Steriel EO Gesteniseerd met ethylenoxide. ⚠ Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. De vloestofbaan (indien aanwezig) is pyrogenvrij.

REF Informatie over productcode, LOT lotnummer en ⚠ uiterste gebruiksdatum: zie verpakking.

Verander niets aan het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel of zijn componenten. De procedure dient te worden uitgevoerd door geschold personeel met kennis van anatomische oriëntatiepunten, veilige behandelings technieken en mogelijke complicaties.

Let op: STATLOCK® bevat geen latex van natuurlijke rubber.

Inhoud: De verpakking bevat een STATLOCK®-bevestigingshulpmiddelstelsel en eventueel ook een celstokkussen voor huidpreparatie.

Gebruiksaanwijzing:

STATLOCK® is een bevestigingshulpmiddel voor compatibele medische buisjes en katheters. Er zijn meerdere ontwerpen voor STATLOCK®-kussens en STATLOCK®-houders verkrijgbaar.

Kies het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel dat geschikt is voor de slang of katheter die moet worden bevestigd.

Contra-indicaties:

Bekende allergie tegen tape of hechtmiddelen. Bekende gevoeligheid voor benzocaine.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

1. Gebruik het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel niet wanneer bijzondere kleefkracht niet vereisd is, zoals bij een verwarde patiënt, een hulpmiddel met onbewaakte toegang, bezwete of niet-aanklevende huid.
2. Neem tijdens het aanbrengen en verwijderen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel de bij bloed en lichaamsvloeistofbehandeling algemeen geldende voorzorgsmaatregelen en infectiebestrijdingsprocedures in acht.
3. **HECHT HET STATLOCK®-CELSTOKKUSSEN MET HECHTDRAAD AAN DE HUID ALS DAT GEWENST IS OF NOODZAKELIJK WORDT GEACHT.**
4. Zorg dat het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel niet in contact komt met alcohol of aceton; beide stoffen kunnen de samenhang van de componenten en de kleefkracht van het STATLOCK®-celstokkussen verminderen.
5. Zorg dat de katheter of slang tijdens het aanbrengen of verwijderen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel zo min mogelijk wordt getraaid.
6. Voor de bevestiging van centraal-veneuze en arteriële katheters moet een Luer lock koppeling voor het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel worden gebruikt.
7. Breng op of bij de insertieplaats altijd hechtstrips aan centraal-veneuze en arteriële katheters aan wanneer u het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel gebruikt.
8. Verwijder olie en vochtinbrengende crèmes van de huid rond het doelgebied.
9. De aankleving van het STATLOCK®-celstokkussen en de ligging van de katheter of slang moeten routinematig worden geïnspecteerd.
10. Plaats het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel zodanig op de huid dat de pijn naar de tip van de katheter wijzen.
11. Het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel moet minstens om de 7 dagen worden vervangen.
12. Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Het opnieuw gebruiken en/of opnieuw verpakken kan een risico van infectie voor de patiënt of gebruiker inhouden, kan een invloed hebben op de structurele integriteit en/of het essentiële materiaal en de ontwerpkenmerken van het hulpmiddel die tot een fout van het hulpmiddel en/of letsel, ziekte of overlijden van de patiënt kunnen leiden.
13. Niet opnieuw steriliseren. De steriliteit van het hulpmiddel voor eenmalig gebruik kan na hersterilisatie niet worden gegarandeerd als gevolg van een onbepaalde mate van mogelijke pyrogene of microbële contaminatie die tot infectieuze complicaties kan leiden. Hersterilisatie kan een invloed hebben op de structurele integriteit, het essentiële materiaal en/of de ontwerpkenmerken en kan leiden tot een onomkeerbaar verlies van functionaliteit en/of een fout van het hulpmiddel.

Maak bij het aanbrengen en verwijderen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel gebruik van steriele behandelings technieken. Raadpleeg de afbeeldingen voor STATLOCK®-specifieke details.

Uitbreidingsset: Indien aanwezig, vullen, spoelen en aankoppelen volgens bijgevoegde aanwijzingen.

Aanbrengen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel:

1. **PREPAREREN:** Prepareer het doelgebied voor het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel met alcohol om vet en vocht te verwijderen en gebruik een huidpreparatiemiddel om de huid te beschermen en meer

kleefkracht te geven. **VOLLEDIG LATEN DROGEN. CONTACT MET ALCOHOL KAN DE SAMENHANG VAN COMPONENTEN EN DE KLEEFKRACHT VAN HET CELSTOKKUSSEN VERMINDEREN. HET STATLOCK®-BEVESTIGINGSHULPMIDDEL ALTIJD EERST AAN DE KATHETER BEVESTIGEN VOORDAT HET KUSSEN OP DE HUID WORDT GEPLAKT.**

2. **AANDRUKKEN:** Voordat het celstokkussen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel op de huid wordt aangebracht, moet de slang of katheter aan de STATLOCK®-houder bevestigd worden.
3. **AFPELLEN:** Pel de papieren deklaag van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel af.
4. **PLAATSEN:** Plaats het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel telkens met één zijde op het doelgebied van de huid.

N.B.:

- Het celstokkussen van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel kan worden aangehecht nadat met behulp van röntgenopnamen de juiste positie van de katheter of slang is geverifieerd.
- Breng bij centraal-veneuze en arteriële katheters hechtstrips aan voor extra veiligheid bij het verwijderen van de pleister van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel.


Algehele verwijdering van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel:
Verwijder voorzichtig de overlappende verbandmiddelen met gebruikmaking van oprektechniek en verwijder de hechtingen (indien van toepassing).

1. **MAAK** de katheter of slang los van de houder van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel.
2. **LOS** de kleefstof van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel op met een watte met alcohol, terwijl u het STATLOCK®-celstokkussen voorzichtig optilt.
3. **NOTEER** de wisseling van de pleister van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel op de behandelingsplaats van de patiënt.
4. **WERP** al het gebruikte materiaal weg in de daarvoor geschikte afvoerccontainers.

Extensieset

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik als extensie voor het I.V.-vloestoftoedieningssysteem. De mannelijke-Luer-adaptor van de extensieset van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel is speciaal ontworpen om de extensieset te bevestigen als hij gebruikt wordt als onderdeel van het STATLOCK®-bevestigingshulpmiddel.

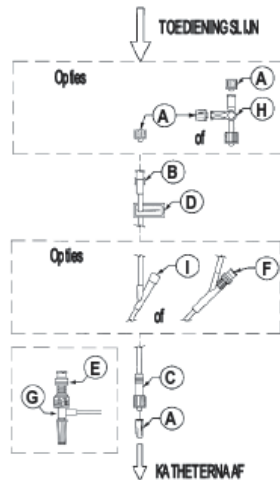

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik aseptische technieken.

1. Draai alle aansluitingen vast.
2. Verwijder zoals vereist de beschermoppen (A).
3. Sluit de vrouwjespoort (B) aan op de vloestoftoedieningslijn of het instrument en vul/spoel.
4. Sluit de mannetjespoort (C) aan op de katheternaaf.
5. Open de schuifdemer (D) voor onbelemmerde flow.
6. Bet het septum van de injectieplaats en het SmartSite®-hulpmiddel (indien aanwezig) met geprefereerd ontsmettingsmiddel.

Opties / Voorzorgsmaatregelen:

Naaldloze klep (E) en Y-plaats met naaldloze klep (F)

1. Sluit vloestoflijn of -Instrument aan op het midden van de klep met uitsluitend gebruik van Luer lock-aansluitingen.

2. Gebruik geen canule met stompe tip of conventionele naald. Als een naald moet worden gebruikt, moet een PRN-adaptor aan worden bevestigd en als standaard-injectieplaats worden gebruikt.

T-connector (G)

Afsluiterkraan (H)

1. Plaats de hendel boven de poort die u wilt sluiten.
2. Open de poort voor vloestoftoediening.
3. Sluit de beschikbare poort en doe er een dop op als hij niet wordt gebruikt.

Standaard-Y-plaats (I)

1. Gebruik uitsluitend met conventionele naald. Niet gebruiken met canule met stompe tip.

AAANTEKENINGEN

1. De slang is niet-DEHP PVC.
2. Werp de gebruikte set weg in de toepasselijke container.

BARD

Bard en StatLock zijn gedeponeerde handelsmerken van C. R. Bard, Inc. of een gelieerd bedrijf. SmartSite is een handelsmerk van Alaris Medical Systems.

Gefabriceerd in Mexico.