

schülke -†



gigasept® AF forte

Een aldehyde vrij concentraat voor gecombineerde reiniging en desinfectie van medische instrumenten (CE).

Onze pluspunten

- volgens de nieuwe Europese standaarden, dus uitgebreid werkingsspectrum
- effectief tegen o.a. tuberculose en mycobacteriën
- standtijd 7 dagen
- aangename geur
- geschikt voor ultrasoon
- korte inwerk tijden, ook met zware belasting, door geoptimaliseerde samenstelling

Toepassingen

Gigasept® AF forte is een aldehyde vrij preparaat voor gecombineerde reiniging en desinfectie van gevoelige en flexibele endoscopen, anesthesie toebehoren, beademingsmaskers, chirurgisch instrumentarium, etc. [CE0297].

Toepassingsmethoden / tips

Zorg ervoor dat de te behandelen materialen volledig nat zijn en gevuld zonder lucht. Wanneer de inwerktijd is verstreken spoel dan grondig af met water met de kwaliteit welke overeenkomt met het verdere gebruik van de materialen / instrumenten (b.v. steriel water). Zo worden ongewenste interacties en effecten tijdens opvolgende manuele of machinale behandelingen vermeden.

Niet te gebruiken in combinatie met thermochemische processen gebaseerd op aldehyden. Aldehyde vrije producten genieten de voorkeur.

Naast de manuele behandeling van endoscopen en instrumenten is gigasept® AF forte ook geschikt voor semi-automatische en vol-automatische behandeling met machines welke draaien met een cyclisch proces op kamertemperatuur.

Interacties

Indien gigasept® AF forte oplossing of concentraat in contact komt met een ander product (voornamelijk producten met aldehyden) dan kan er aanslag / verkleuring / verlies van effectiviteit optreden. Het vermengen met andere producten wordt hierdoor afgeraden. **Voor het eerste gebruik van gigasept® AF forte raden wij aan alle instrumenten, toebehoren en bakken grondig te spoelen.**

Microbiologische werkzaamheid

Bacteriën (incl. *M. terrae* en *M. avium*), schimmels, beperkt virucide* (inclusief HIV, HBV, HCV), papova virus, adenovirus, effectief tegen antibiotica resistente kiemen, *clostridium difficile* en *helicobacter pylori* binnen VAH concentraties.

*volgens de RKI aanbeveling, bundesgesundheitsblatt 01/2004

Toepassingsconcentraties / Inwerktijd

Effectiviteit	5 min	15 min	30 min	60 min
aangemeld voor de VAH lijst bacteriën (incl. <i>M. terrae</i>), schimmels, MRSA	5%	2%	0.75%	
beperkt virucide* (incl. HBV/HIV/HCV)	1%			
ultrasoon bad: bacteriën, schimmels	2%			
adenovirus				2%

*volgens RKI aanbeveling, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

1L van een 2%-ige oplossing komt overeen met 980ml water en 20ml concentraat

Volgens de Europese standaarden is gigasept® AF forte bactericide, effectief tegen gisten en mycobacteriën.

- bactericide (EN 13727/EN 14561): *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*
- effectief tegen gisten (EN 13624/EN 14562): *C. albicans*
- Mycobactericide (EN 14348/ prEN 14563): *M. terrae* en *M. avium*

De gebruikconcentratie/ inwerktijd volgens de EN/prEN is als volgt:

- 5% - 5 min.
- 2% - 15 min
- 0,75% - 30 min

gigasept® AF forte

Productgegevens

Actieve substantie: 100 g bevat: 10 g dimethyldioctylammoniumchloride, 15 g phenoxypropanols, 15.6 g alkylguanidine acetaat, 9,5 g laurylpropylenediamine.

Labelling volgens de richtlijn (EC) No. 648/2004: 5 – 15% non-ionische bestanddelen, geurstoffen.

Overige bestanddelen: pH regulatoren, corrosie inhibitoren, kleurstoffen.

Chemisch-fysische gegevens

Concentraat:

Voorkomen helder, groene vloeistof
Dichtheid bij 20°C 0.99 g/ml
pH ca. 9.9

0.75% gebruiksooplossing

Voorkomen helder, groene vloeistof
pH ca. 8.8

5% gebruiksooplossing

Voorkomen helder, groene vloeistof
pH ca. 9.0

Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen

gerelateerd aan concentraat)

- R11:** Licht ontvlambaar.
R22: Schadelijk bij opname door de mond.
R34: Veroorzaakt brandwonden.
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36: Irriterend voor de ogen.
R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S26: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.
S45: bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Bijzondere aanwijzingen

De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) adviseert het gebruik van handschoenen tijdens het werken met desinfectantia welke niet geschikt zijn voor de huid. Bij een 5% gebruiksooplossing kan contact met ogen irritatie veroorzaken. Gepaste maatregelen dienen te worden genomen. Overschrijden van de aanbevolen inwerktijden en concentraties wordt afgeraden.

Product / Accessoires

	Artikel nummer
2L fles	125602
5L can	125603
Doseerdop voor 2L fles	183401
Sleutel voor 5L can	135810
Kraan voor 5L can	135501

Diverse maten instrumentenbakken verkrijgbaar op aanvraag

Milieu

Schülke produceert producten op een economische wijze en met moderne, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen behoudens hoge kwaliteitsstandaarden.

De formule van gigasept® AF forte concentraat is geoptimaliseerd om een voordelige ratio verpakking tot inhoud te bereiken. Hierbij wordt bespaard op energie tijdens vervoer en wordt het milieu gespaard wanneer het afval wordt.

Met een standtijd van 7 dagen, wordt het afvalwater aanzienlijk minder belast in vergelijking met oplossingen die elke dag ververst dienen te worden.

Informatie en referenties

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de gigasept® AF forte is terug te vinden op internet via website www.schuelke.com

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031 (0)23 535 26 34.



Schülke & Mayr is gecertificeerd conform DIN EN 9001 en DIN EN ISO 13485 (registratienummer 004567MP21) en beschikt over een gevalideerd milieumanagementsysteem volgens de ecologische auditverordening (reg.-nr. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr Benelux BV
Prins Bernhardlaan 2c
2032 HA Haalrem
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70

Schülke & Mayr Belgium NV
Beaulieustraat 4
B-1830 Machelen
Tel: +32 (02) 479 73 35
Fax: +32 (02) 479 99 66